

COMBIMATE OPEN ZAKJES

Verpakt per 30 stuks.

LARGE/X-LARGE

Lengte (gesloten) zakje: 20 cm



BESTELCODE BEIGE	BESTELCODE BEIGE MET KIJKVENSTER	FLENSMAAT
ILBV 238		• 38 mm
ILBV 245	ILTV 245	• 45 mm
ILBV 257	ILTV 257	• 57 mm
ILBV 270	ILTV 270	• 70 mm
	IXLTV 285 (15 stuks)	• 85 mm
	IXLTV 2100 (15 stuks)	• 100 mm

MEDIUM

Lengte (gesloten) zakje: 17 cm.



BESTELCODE BEIGE	FLENSMAAT
IMBV 238	• 38 mm
IMBV 245	• 45 mm
IMBV 257	• 57 mm

SMALL

Lengte (gesloten) zakje: 15,5 cm.



BESTELCODE BEIGE	FLENSMAAT
ISBV 245	• 45 mm
ISBV 257	• 57 mm

COMBIMATE OPEN ZAKKEN HIGH-OUTPUT

Sluiting naar keuze: clip of bodemkraantje. Inclusief nachtzakadapter en sluitclip. Verpakt per 30 stuks. Lengte zakje: 28 cm.



BESTELCODE BEIGE MET KIJKVENSTER	FLENSMAAT
ILT 245B	• 45 mm
ILT 257B	• 57 mm
ILT 270B	• 70 mm
IXLT 285B (15 stuks)	• 85 mm
IXLT 2100B (15 stuks)	• 100 mm

BIJPASSENDE ACCESSOIRES:



CIRCLEMATE Stomapleister

Voorkomt omkrullen of loslaten van de plak, het uitdrogen van de randen of het slijmerig worden van de randen bij bijvoorbeeld zwemmen. In beige en witte uitvoering. De witte pleister is huidvriendelijker.

FLENSMAAT	BESTELCODE BEIGE PLEISTER	BESTELCODE WITTE PLEISTER
38 mm	CMB 1577	CMW 1577
45 mm	CMB 1577	CMW 1577
57 mm	CMB 1590	CMW 1590
70 mm	CMB 1598	CMW 1598

VARIMATE THIN strips

Voorkomt omkrullen of loslaten van de plak, het uitdrogen van de randen of het slijmerig worden van de randen. Bij overgevoeligheid voor pleisters. Geschikt voor op de geïrriteerde huid.



BESTELCODE	AFMETING	GESCHIKT VOOR
VMT CURVE	3 x 9 cm	Ronde plakken/hoekjes
VMT 0311	3 x 11 cm	Rechte plakken
VMT 0511	5 x 11 cm	Rechte plakken; breder stripje
VMT 0522	5 x 22 cm	Rechte, XL-plakken

EUROTEC gordel


Verstelbaar met 2 haakjes. De gordel zorgt voor extra steun en fixatie.



BESTELCODE	
SB 25	gordeltje 2,5 cm breed
SB 52	gordeltje 5 cm breed

GELLYMATE dragees of capsules

Voor het indikken van dunne ontlasting in het zakje. Met stomadeodorant.

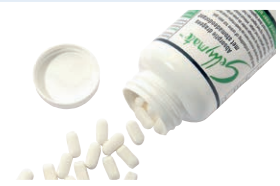

Bestelcode dragees: **GD 140**
Bestelcode capsules: **GM 140**

EUROTEC CLIP:

Voor het sluiten van de High-Outputzak indien het kraantje is afgeknipt.



Bestelcode: **CLS 10**



BIJPASSENDE ACCESSOIRES:



EUROTEC Nachtzak voor bodemkraantje

Past direct op het bodemkraantje, dus geen losse adapter meer nodig. Inhoud: 2 liter. Verpakt per 10 stuks.

Bestelcode: **NDB 10**



EUROTEC adapter voor bodemkraantje

Voor het aansluiten van een nacht- of beenzak (van een ander merk en met een conische nippel) aan de High-Output zakken. Verpakt per 10 stuks.

Bestelcode: **AD 10**

**WILT U HET GRATIS STOMAZAKBOEKJE
MET HANDIGE TIPS ONTVANGEN?
NEEM CONTACT MET ONS OP.**



EuroTec BV
Schotsbossenstraat 8
4705 AG Roosendaal

T 0165-551226
F 0165-541656

info@eurotec.nl
www.eurotec.nl



**2-DELIG OPEN OPVANGSYSTEEM
VLAK**



2-DELIG OPEN OPVANGSYSTEEM VLAK

Het 2-delige COMBIMATE systeem bestaat uit huidplakken en stomazakjes van EuroTec. Deze plakken hebben een zeer huidvriendelijke en soepele kleeflaag. Ze zijn er met veel voorgestante stomaopeningen die gemakkelijk iets opgerekt kunnen worden. Een vlakke huidplak is bedoeld voor stoma's boven huidniveau. Bolle (convex) huidplakken zijn bedoeld voor stoma's op of onder huidniveau of als de vlakke huidplak lekkages geeft. De huidplak hecht het best als de huid nog iets klam is en heeft enige tijd nodig om goed vast te hechten. Voorverwarmen is niet nodig.

De zakjes zijn verkrijgbaar in verschillende maten en modellen. Ze klikken eenvoudig op de huidplak, zoals het 'Tupperware' kliksysteem. Hiervoor is maar weinig kracht nodig. Ook bij een slappe buik is het opklikken gemakkelijk. Zakjes en plakken zijn ook te combineren met het ConvaTec Natura systeem.



UNIEKE KENMERKEN HUIDPLAK:

- ✓ Zeer huidvriendelijke kleeflaag van volledig hydrocolloïd van 1,4 mm dik, zonder toegevoegde synthetische rubbers, die zeer goed vocht kan absorberen. Hierdoor hecht de huidplak beter en blijft de huid in topconditie bij warm weer of inspannende activiteiten.
- ✓ De huidplak kan op een extreem gevoelige of reeds geïrriteerde huid worden toegepast.
- ✓ De huidplak is zeer comfortabel in het dragen, door de zeer zachte schuimtoplaag.
- ✓ Veel voorgestante stomaopeningen.
- ✓ De opreekbare stomaopening snijdt niet in de stoma wanneer deze beweegt. [\[Afbeelding 1\]](#)
- ✓ Knippen is bijna nooit meer nodig, omdat de stomaopening eenvoudig op te rekken is als deze iets te klein is of de stoma ovaal is. [\[Afbeelding 1\]](#)
- ✓ Diverse versies vlakke huidplakken:
 - **SuperSoft** = vlakke huidplak van volledig hydrocolloïd.
 - **SuperFlex** = vlakke huidplak met witte of beige pleisterrand.
 - **XL-plakken** = vlakke extra grote huidplak voor betere hechting bij grote huidoneffenheden, zoals een breuk.




UNIEKE KENMERKEN OPEN ZAKJES:

- ✓ Extra lang werkend staafilter [\[Afbeelding 3\]](#); darmgassen worden vanzelf reukloos afgevoerd.
- ✓ Beige zakje voorzien van een Gore-tex filtermembraan om doorlekken of afgeven aan de kleding te voorkomen. [\[Afbeelding 3\]](#)
- ✓ Ledigbaar zakje met speciale SoftSafe klittenbandsluiting. U rolt de afvoeropening 5 slagen op, wrijft deze even aan en het zakje is hermetisch gesloten. [\[Afbeelding 4\]](#)
- ✓ Praktische 'Finger Pocket' [\[Afbeelding 5\]](#) om met één hand de afvoer eenvoudig te openen en te reinigen met de andere hand.
- ✓ U kunt het zakje inkorten door de sluiting één keer extra op te rollen en onder de voorzijde van het zakje te vouwen [\[Afbeelding 6\]](#)



COMBIMATE SUPERSOFT HUIDPLAKKEN VLAK

Bij een stoma boven huidniveau. Afmeting plak: 10,6 x 10,6 cm. Verpakt per 5 stuks.

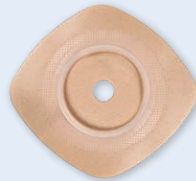

BESTELCODE	FLENSMAAT	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
FSS 3813	• 38 mm	13 mm (start)	28 mm (knip)
FSS 3822	• 38 mm	22 mm	24 mm
FSS 3825	• 38 mm	25 mm	27 mm
FSS 3828	• 38 mm	28 mm	-
FSS 4513	• 45 mm	13 mm (start)	35 mm (knip)
FSS 4522	• 45 mm	22 mm	24 mm
FSS 4525	• 45 mm	25 mm	27 mm
FSS 4528	• 45 mm	28 mm	31 mm
FSS 4532	• 45 mm	32 mm	34 mm
FSS 4535	• 45 mm	35 mm	-
FSS 5713	• 57 mm	13 mm (start)	47 mm (knip)
FSS 5732	• 57 mm	32 mm	34 mm
FSS 5735	• 57 mm	35 mm	37 mm
FSS 5738	• 57 mm	38 mm	40 mm
FSS 5741	• 57 mm	41 mm	43 mm
FSS 5744	• 57 mm	44 mm	47 mm
FSS 7013	• 70 mm	13 mm (start)	60 mm (knip)

COMBIMATE SUPERFLEX HUIDPLAKKEN VLAK

Bij een stoma boven huidniveau. Met beige of witte pleisterrand. Doorsnede plak: 12 cm. (flensmaat 70 mm: 15 cm.) Verpakt per 5 stuks



BESTELCODE BEIGE	BESTELCODE WIT	FLENSMAAT	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
FFB 3813	FFW 3813	• 38 mm	13 mm (start)	28 mm (knip)
FFB 3822		• 38 mm	22 mm	24 mm
FFB 3825		• 38 mm	25 mm	27 mm
FFB 3828		• 38 mm	28 mm	-
FFB 4513	FFW 4513	• 45 mm	13 mm (start)	35 mm (knip)
FFB 4522		• 45 mm	22 mm	24 mm
FFB 4525		• 45 mm	25 mm	27 mm
FFB 4528		• 45 mm	28 mm	31 mm
FFB 4532		• 45 mm	32 mm	34 mm
FFB 4535		• 45 mm	35 mm	-
FFB 5713	FFW 5713	• 57 mm	13 mm (start)	47 mm (knip)
FFB 5732		• 57 mm	32 mm	34 mm
FFB 5735		• 57 mm	35 mm	37 mm
FFB 5738		• 57 mm	38 mm	40 mm
FFB 5741		• 57 mm	41 mm	43 mm
FFB 5744		• 57 mm	44 mm	47 mm
FFB 7013	FFW 7013	• 70 mm	13 mm (start)	60 mm (knip)

COMBIMATE SUPERSOFT XL PLAKKEN VLAK

Bij een (groot) stoma boven huidniveau of voor een betere hechting bij een groot huidoppervlak. Afmeting plak: 15 x 15 cm. Verpakt per 5 stuks.



BESTELCODE	FLENSMAAT	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
FSSL 4513	• 45 mm	13 mm (start)	35 mm (knip)
FSSL 5713	• 57 mm	13 mm (start)	47 mm (knip)
FSSL 7013	• 70 mm	13 mm (start)	60 mm (knip)
FSSL 8513	• 85 mm	13 mm (start)	75 mm (knip)
FSSL 10013	• 100 mm	13 mm (start)	90 mm (knip)

